

Lactatémie au lobe de l'oreille

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Surface propre
- Fiche de données et stylo
- Gants
- Désinfectant
- Coton
- Autopiqueur
- Poubelle
- Poubelle pour autopiqueur
- Capillaires, microtubes / bandes de mesure
- Appareil d'analyse



PRÉPARATION :



- Si nécessaire, stimuler localement le saignement avec une crème favorisant la circulation sanguine
- Désinfecter l'endroit prévu pour la piqûre
- Percer la peau avec une lancette / un autopiqueur (dans l'idéal une fois par test seulement)
- Contrôler le flux de sang, nettoyer avec un coton sec

PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON :



- Nettoyer la piqûre avec un coton sec (la sueur fausse les valeurs mesurées)
- Faire sortir un peu de sang en massant l'endroit et en pressant un minimum (une pression trop forte fait augmenter la part de plasma sanguin et fausse les valeurs mesurées)
- Nettoyer la première goutte de sang avec du coton
- Prélever le sang dès la deuxième goutte (avec un capillaire ou une bande de mesure)
- Mettre le capillaire dans une solution hémolytique, fermer le microtube et secouer